

Гистероскопы от KARL STORZ

Диагностические и операционные
решения для «офисной гистероскопии»



Гистероскоп TROPHYSCOPE® по CAMPO

на основе интегрированной оптики 2 мм со стержневыми линзами

Отличительные признаки:

- Позволяет получить первичный атравматичный доступ в полость матки под визуальным контролем благодаря диаметру 2,9 мм
- Диагностическое обследование полости матки при помощи гистероскопа диаметром 2,9 мм, во время которого наружный тубус находится в пассивном положении
- При необходимости аспирации или/и использования операционных инструментов под визуальным контролем тубус продвигают в сторону дистального конца гистероскопа, приведя его в рабочее положение
- Возможность применения двух разных тубусов:
 - Диагностического тубуса с постоянным потоком жидкости
 - Операционного тубуса с постоянным потоком жидкости и инструментальным каналом для использования с полужесткими операционными инструментами 5 Шр. и биполярными электродами
- Тубусы позволяют вводить инструмент спиротом для взятия прицельной биопсии эндометрия

Без рабочего канала



26008BAC **TROPHYSCOPE®** по CAMPO, оптика HOPKINS® 30°, размер 2,9 мм, длина 24 см, с ирригационным разъемом, для использования с операционными тубусами Continuous-Flow 26152DA и 26152DB

26152DA **Тубус диагностический Continuous-Flow**, размер 3,7 мм, длина 18 см, с аспирационным разъемом, для использования с TROPHYSCOPE® по CAMPO 26008BAC

С рабочим каналом



26008BAC **TROPHYSCOPE®** по CAMPO, оптика HOPKINS® 30°, размер 2,9 мм, длина 24 см, с ирригационным разъемом, для использования с операционными тубусами Continuous-Flow 26152DA и 26152DB

26152DB **Тубус операционный Continuous-Flow**, размер 4,4 мм, длина 16 см, с каналом для полужестких инструментов 5 Шр., с одним краном и одним переходником с замком LUER, для использования с TROPHYSCOPE® по CAMPO 26008BAC

Гистероскоп по ВЕТТОСЧИ® (4 мм)

на основе оптики 2 мм со стержневыми линзами


Отличительные признаки:

- Атравматичное введение в цервикальный канал благодаря овному тубусу и наружному диаметру 4,2 мм
- Рабочий канал позволяет использовать полужесткие операционные инструменты 5 Шр. и биполярные электроды



26008BA Оптика HOPKINS® передне-бокового видения 30°, Ø 2 мм, длина 26 см, автоклавируемая, со встроенным оптоволоконным световодом, цветовой код: красный

С рабочим каналом

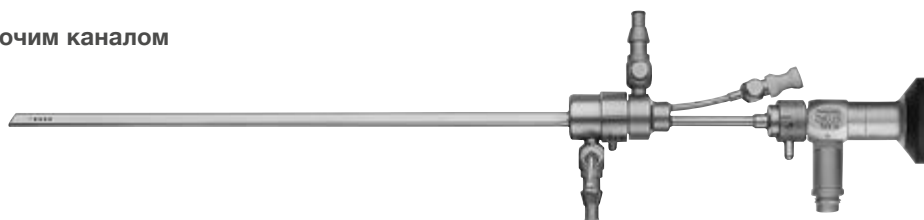

26152BI Тубус внутренний по ВЕТТОСЧИ®, размер 3,6 мм

26152BO Тубус внешний по ВЕТТОСЧИ®, размер 4,2 мм

Без рабочего канала



26161RN Тубус внутренний, Ø 2,8 мм, с одним краном, для использования с внешним тубусом 26161R

26161R Тубус внешний Continuous-Flow, Ø 3,6 мм, с одним краном, для использования с внутренним тубусом 26161RN

Гистероскоп по ВЕТТОСЧИ® (5 мм) на основе оптики 2,9 мм со стержневыми линзами


Отличительные признаки:

- Атравматичное введение в цервикальный канал благодаря овальному тубусу
- Рабочий канал позволяет использовать полужесткие операционные инструменты 5 Шр. и биполярные электроды



26120BA **Оптика НОРКИНС®** передне-бокового видения 30°,
Ø 2,9 мм, длина 30 см, автоклавируемая,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

С рабочим каналом

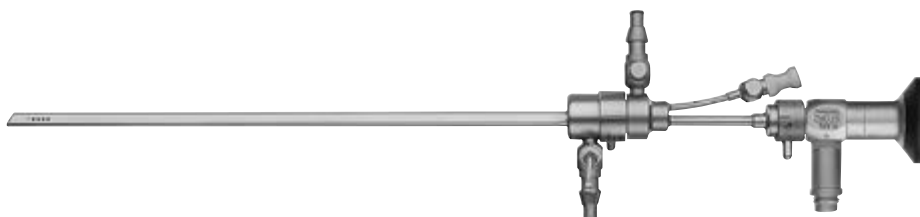

26153BI **Тубус внутренний** по ВЕТТОСЧИ®, размер 4,3 мм


26153BO **Тубус внешний** по ВЕТТОСЧИ®, размер 5 мм

Без рабочего канала



26161VB **Тубус внутренний**, Ø 3,8 мм, с одним краном,
для использования с внешним тубусом 26161VC

26161VC **Тубус внешний**, Ø 4,5 мм, с одним краном,
для использования с внутренним тубусом 26161VB

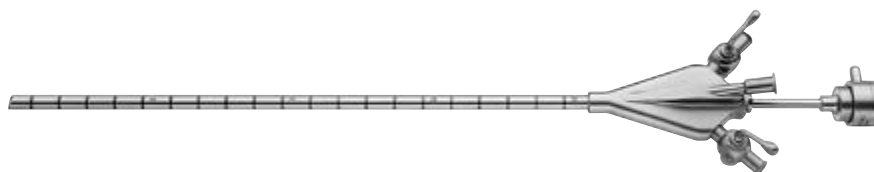

26153EA **Тубус гистероскопа**, размер 5 мм, с каналом для операционных
инструментов 5 Шр., внутренний и внешний тубусы не разделены

Удлиненный гистероскоп по ВЕТТОСЧИ®

26120BAL **Оптика НОРКИНС®** передне-бокового видения 30°,
Ø 2,9 мм, длина 36 см, **автоклавируемая**,
со встроенным оптоволоконным световодом,
цветовой код: красный

26153BIL **Тубус внутренний** по ВЕТТОСЧИ®, размер 4,3 мм, с каналом
для полужестких операционных инструментов 5 Шр., с одним краном,
для использования с внешним тубусом 26153BOL

26153BOL **Тубус внешний** по ВЕТТОСЧИ®, размер 5 мм, рабочая длина 28 см,
с одним краном, для использования с внутренним тубусом 26153BIL

Подходящие механические инструменты размером 5 Шр. для рабочего канала имеют артикул 26160XX.

Полужесткие многоразовые операционные инструменты 5 Шр.

Длина 34 см

		
	26159ENW	Ножницы , полужесткие, тупые, одна бранша подвижна, 5 Шр., длина 34 см
	26159SHW	Ножницы , полужесткие, острые, одна бранша подвижна, 5 Шр., длина 34 см
	26159UHW	Щипцы захватывающие для биопсии , полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см
	26159H	Щипцы пулевые захватывающие по HESSELING, полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см
	26159DHW	Выкусыватель , полужесткий, режущий насквозь, одна бранша подвижна, 5 Шр., длина 34 см
	26159BHW	Щипцы биопсийные ложкообразные , полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см
	26159DS	Щипцы захватывающие по DI SPIEZIO SARDO, полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см
	26159HS	Щипцы пулевые захватывающие, с шипом по HESSELING и DI SPIEZIO SARDO, полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см
	26159G	Зонд по BETTOCCHI®/DI SPIEZIO SARDO, полужесткий, со шкалой в мм, 5 Шр., длина 34 см

Многоразовые биполярные электроды 5 Шр.
Длина 42 см



26159BE **Электрод биполярный диссекционный,**
полужесткий, 5 Шр., длина 42 см



26158BE **Электрод биполярный вапоризационный,**
полужесткий, 5 Шр., игольчатый электрод
загнут под углом 90°, длина 42 см



26159GC **Электрод биполярный шариковый по GORDTS**
и CAMPO, полужесткий, 5 Шр., длина 42 см




26176LE **Шнур высокочастотный, биполярный,**
длина 300 см

Гибкий гистероскоп

Отличительные признаки:

- Благодаря диаметру 3,5 мм введение в цервикальный канал возможно в большинстве случаев без дилатации
- Легкое введение в цервикальный канал благодаря усиленному тубусу
- Возможность фиксации механизма дистального отклонения
- Рабочий канал для использования с гибкими операционными инструментами 3 Шр.

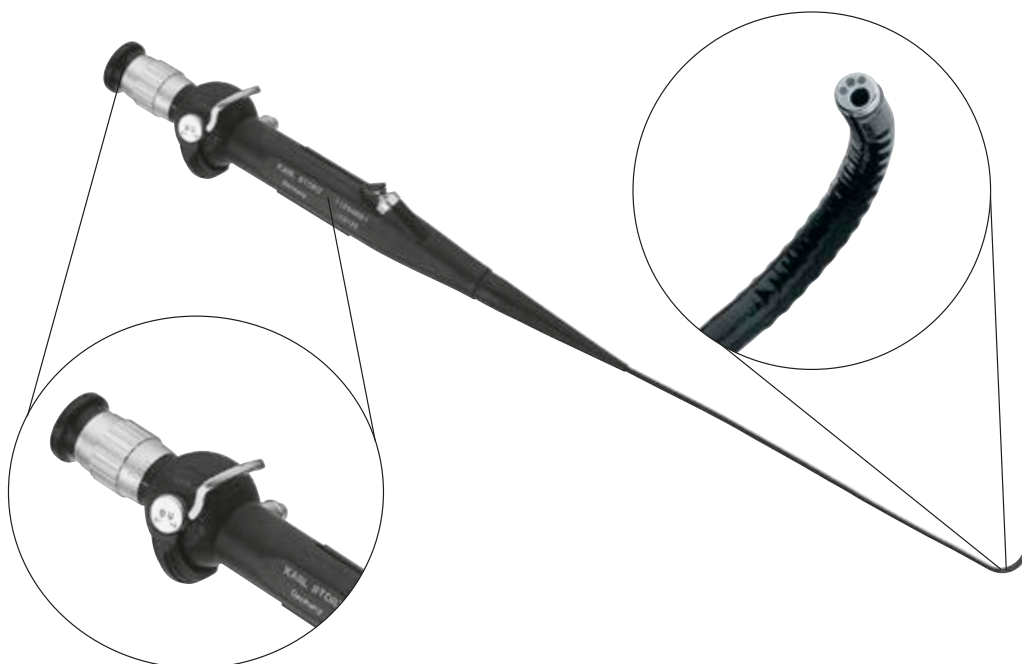

11264BBK1 **Гистерофиброскоп**, с фиксируемым механизмом отклонения,

Подвижность дистального конца	110°/110°
Направление обзора:	0°
Угол обзора:	90°
Диаметр рабочего канала:	1,48 мм
Наружный диаметр:	3,5 мм/3,6 мм
Рабочая длина:	240 мм

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

Прибор проверки герметичности

Щетка для чистки

2x Колпачок уплотняющий

Заглушка с замком LUER

Переходник с замком LUER

KARL STORZ TELE PACK+

Новая комплексная система TELE PACK+ от KARL STORZ объединяет в одном компактном, портативном приборе монитор, светодиодный источник света, блок управления видеокамерой FULL HD и блок документирования с интегрированной функцией подключения к сетевой инфраструктуре.

Отличительные признаки:

- Передача изображения в качестве FULL HD
- Сенсорный монитор 18,5" с экранной клавиатурой
- Документирование с записью и хранением данных на USB-накопителях и на внутреннем жестком диске 50 ГБ
- Сетевая функция в комбинации с программным обеспечением SCENARA® .connect для двустороннего обмена данными пациента с сетью клиники HIS/PACS
- Совместимость с жесткими, гибкими и одноразовыми эндоскопами от KARL STORZ



TP101

TELE PACK+, эндоскопический видеоблок с 2 входами для видеокамер (X-Line и C-Line) для использования с гибкими видеоэндоскопами и одночиповыми видеоголовками (до FULL HD), со светодиодным источником света, цифровым модулем обработки изображений с разъемами для USB-накопителей и возможностью подключения к сетевой инфраструктуре, а также с сенсорным монитором FULL HD 18,5", питание 100 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц

Комплектация:

Сетевой кабель, длина 300 см

TH110

Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S™ HX одночиповая FULL HD, 50/60 Гц, постоянный фокус, с прогрессивной разверткой, погружаемая в растворы, стерилизуемая газом и плазмой, фокусное расстояние $f = 16$ мм, 2 свободно программируемые кнопки, для использования с IMAGE1 S™

ENDOMAT® SELECT

Роликовая помпа ENDOMAT® SELECT базируется на различных модулях программного обеспечения, что позволяет использовать ее в разных областях. При проведении диагностической и операционной гистероскопии ENDOMAT® SELECT обеспечивает дилатацию полости матки при контроле давления как в операционной, так и в клинической амбулатории и в частном врачебном кабинете.

Отличительные признаки:

- Постоянный контроль давления при расширении полости матки
- Помпа для аспирации и ирригации для многопрофильного применения
- Простое управление благодаря специальным наборам трубок и автоматическое распознавание трубок



- | | |
|-----------|--|
| UP220 | Помпа ENDOMAT® SELECT , для аспирации или ирригации, с сетевым кабелем, питание 100 – 240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| UP602 | ГИСТЕРОСКОПИЯ , ПО, лицензия, обеспечивает выбор процедуры «HYS», для использования с ENDOMAT® SELECT UP220 |
| 031523-10 | Трубка ирригационная , набор, PC, стерильно, одноразовое применение, упаковка 10 шт., для использования с ENDOMAT® по HAMOU® SCB 26331120-1 и ENDOMAT® SELECT UP220 |



Рекомендуемый набор для «офисной гистероскопии»

За счет выполнения гистероскопических вмешательств в амбулаторном отделении можно расширить потенциал операционной для проведения комплексных операций. Чтобы удовлетворить требования «офисной гистероскопии», мы составили для вас рекомендуемый набор для амбулаторной гистероскопии.

Тонкопросветные гистероскопы позволяют проводить лечение аномалий полости матки с помощью инструментов 5 Шр. даже за пределами операционной и без анестезии и дилатации цервикального канала. TELE PACK+ отвечает требованиям компактной и гибкой системы с высоким качеством изображения. Новая мобильная стойка COR предлагает решение компактной приборной стойки для амбулаторной практики.

- | | |
|-----------|--|
| UG803 | Стойка мобильная COR , базовая комплектация, низкая |
| UG811 | Крышка держателя монитора , для мобильной стойки COR |
| UG854 | Трубка - держатель из нержавеющей стали , для мобильной стойки COR, длина 400 мм |
| UG857 | Модуль монитора , для мобильной стойки COR |
| UG860 | Выдвижной ящик , узкий, для мобильной стойки COR |
| TP101 | TELE PACK+ , эндоскопический видеоблок |
| TH110 | Видеоголовка эндоскопическая IMAGE1 S™ HX одночиповая FULL HD |
| UP220 | Помпа ENDOMAT® SELECT , для аспирации или ирригации |
| UP602 | ГИСТЕРОСКОПИЯ , ПО, лицензия, для использования с ENDOMAT® SELECT UP220 |
| UP610 | Advanced , ПО для пакетов программ, лицензия, для использования с ENDOMAT® SELECT UP220 |
| 031523-10 | Трубка ирригационная , набор, стерильно, одноразовое применение, упаковка 10 шт. |
| 26008BAC | TROPHYSCOPE® по CAMPO, оптика HOPKINS® 30°, размер 2,9 мм, длина 24 см |
| 26152DA | Тубус диагностический Continuous Flow , размер 3,7 мм, длина 18 см |
| 26152DB | Тубус операционный Continuous-Flow , размер 4,4 мм, длина 16 см |
| 26159UHW | Щипцы захватывающие для биопсии , полужесткие, обе бранши подвижны, 5 Шр., длина 34 см |
| 26159SHW | Ножницы , острые, одна бранша подвижна, полужесткие, 5 Шр., длина 34 см |



Перед использованием изделий рекомендуется проверить их на пригодность для предполагаемой операции. Обратите внимание, что описанные в данном материале продукты могут быть доступны не во всех странах из-за различных нормативных требований.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Тел.: +49 7461 708-0
Факс: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com