

Fibroscopios para animales pequeños con longitudes específicas y diámetro reducido



Fibroscopios con diámetro reducido

Características especiales:

- Las dimensiones específicas para veterinaria (mayor longitud y diámetro reducido) facilitan su aplicación en una gran variedad de animales de distintos tamaños
- El mayor ángulo de visión y la movilidad del extremo distal facilitan la orientación
- El canal de trabajo permite utilizar instrumentos quirúrgicos o de aspiración, insuflación o irrigación
- Estanco al agua y completamente sumergible en soluciones de limpieza y desinfección
- Fácil verificación de la estanqueidad
- Esterilizable con gas EtO y FO, Steris® y Sterrad®
- Excelente calidad óptica, tanto del objetivo como del haz de conducción de luz
- Larga vida útil gracias a su resistente construcción y su robusta mecánica



Información de las fechas de los talleres programados en el enlace
<http://go.karlstorz.com/eventsVET>



Nueva
calidad
de imagen

Fibroscopio especial

El conductor de luz perfeccionado proporciona imágenes más nítidas y brillantes

Adecuado tanto para ureterocistoscopia en perros macho, como para broncoscopias, rinoscopias y postrinoscopias en animales pequeños. Su diámetro muy reducido y su longitud especial facilitan la cistoscopia transuretral en los machos, así como la exploración de las partes situadas más distales en el sistema respiratorio inferior.




60003VBK1 Fibroscopio especial

Acodamiento:	180°/100°
Dirección visual:	0°
Ángulo de apertura:	90°
Ø interior canal de trabajo:	1,2 mm
Ø exterior extremo distal:	3 mm
Longitud útil:	100 cm

Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro:

Tapón compensador de presión, para la fuga de gas durante la esterilización
Tester de estanqueidad, con pera y manómetro
Cepillo de limpieza, redondo, flexible
Maletín

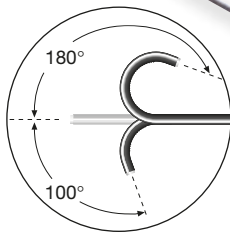

Accesorios opcionales:



60275ZE

Pinzas para biopsia, forma de cuchara, ovaladas, abertura bilateral, 3 Charr., flexibles, longitud 120 cm



60275FE

Pinzas de agarre, abertura bilateral, 3 Charr., longitud 120 cm



27023TD

Extractor de cálculos, nitinol, con punta, helicoidal, 2,5 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso


Broncoscopia para gatos

Para broncoscopias de rutina, rinoscopias y postrinoscopias en perros y gatos. Gracias a sus nuevas longitudes de trabajo y al diámetro reducido, los veterinarios pueden penetrar aún más que antes por el árbol bronquial de los gatos y los perros. La posibilidad de llegar más adentro les permite realizar inspecciones visuales más a fondo y extraer biopsias broncoalveolares de áreas más profundas del tracto respiratorio. De este modo, se reduce el riesgo de que no vean alteraciones o cuerpos extraños que, con endoscopios más cortos, quedarían fuera de su alcance visual.





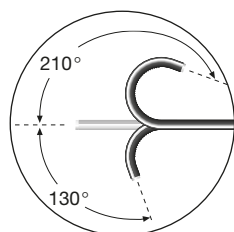

60002VBK2	Broncofibroscopio , para broncoscopias de rutina y postrinoscopias en gatos y perros pequeños
Acodamiento:	210°/130°
Dirección visual:	0°
Ángulo de abertura:	90°
Ø interior canal de trabajo:	1,5 mm
Ø exterior extremo distal:	3,7 mm
Longitud útil:	65 cm
Longitud total:	91 cm

Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro:



- Tapón compensador de presión, para la fuga de gas durante la esterilización
- Tester de estanqueidad, con pera y manómetro
- Cepillo de limpieza, redondo, flexible
- Válvula de aspiración, reutilizable
- Válvula de aspiración, para un solo uso, envase de 5 unidades
- Adaptador de irrigación, reutilizable
- Adaptador para llave de dos vías
- Maletín

Accesorios adicionales:


- | | | |
|---|---------|---|
|  | 60275ZE | Pinzas para biopsia , forma de cuchara, ovaladas, abertura bilateral, 3 Charr., flexibles, longitud 120 cm |
|  | 60275FE | Pinzas de agarre , abertura bilateral, 3 Charr., longitud 120 cm |
|  | 27023TF | Extractor de cálculos , nitinol, con punta, helicoidal, 3 Charr., longitud 120 cm, 4 alambres, cestilla 16 mm Ø, estéril, para un solo uso |
|  | 27023Y | Cepillo para citología , 3 Charr., no estéril, para un solo uso, envase de 5 unidades |

Broncoscopia para perros

Para broncoscopias de rutina, rinoscopias y postrinoscopias en perros y gatos. La mayor longitud de estos fibroscopios, en comparación con los broncoscopios de la medicina humana, facilita la exploración de animales de mayor tamaño. A través del canal de trabajo pueden extraerse biopsias, muestras por irrigación, citologías o cuerpos extraños.



60001VLK2	Broncofibroscopio	
Acodamiento:		195°/105°
Dirección visual:		0°
Ángulo de apertura:		110°
Ø interior canal de trabajo:		2,3 mm
Ø exterior extremo distal:		5,2 mm
Longitud útil:		85 cm
Longitud total:		113 cm

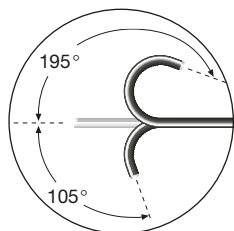

Los siguientes accesorios se incluyen en el suministro:

- Tapón compensador de presión**, para la fuga de gas durante la esterilización
- Tester de estanqueidad**, con pera y manómetro
- Cepillo de limpieza**, flexible
- Válvula de aspiración**, reutilizable
- Válvula de aspiración**, para un solo uso, envase de 5 unidades
- Adaptador de irrigación**, reutilizable
- Adaptador para válvula de dos vías**
- Maletín**

Accesorios adicionales:



60001KL **Pinzas para biopsia**, forma de cuchara, redondas, 1,7 mm Ø, longitud 120 cm



60002KS **Pinzas de agarre**, abertura bilateral, flexibles, 1,7 mm Ø, longitud 120 cm




11008 **Catéter de aspiración**, 1,5 mm Ø, longitud 100 cm, con pieza de acople 10479F



60007BL **Cepillo para citología**, 1,8 mm Ø, longitud 120 cm, incluye:
Tubo exterior y mango

Notas

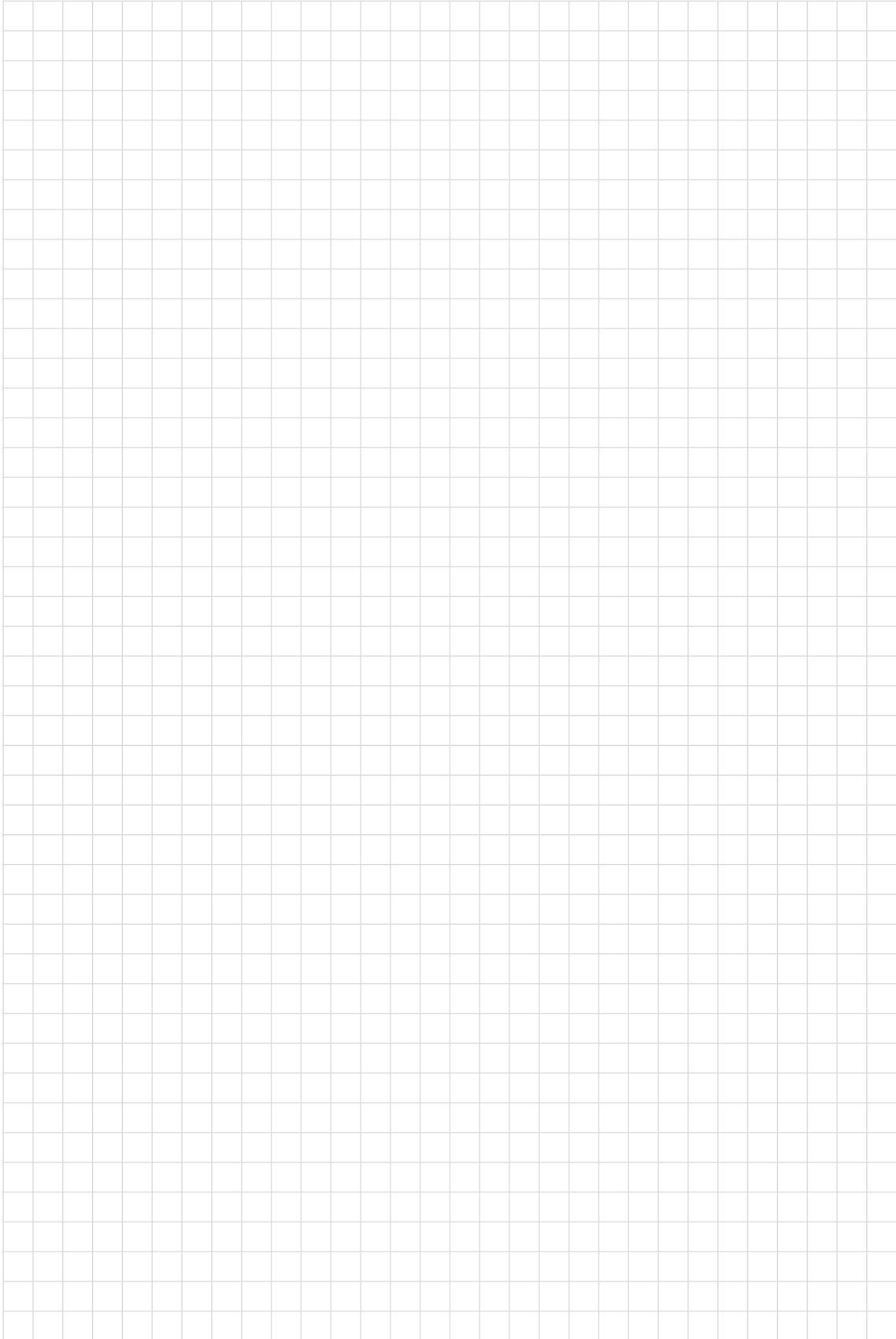

Notas



More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania
Teléfono: +49 7461 708-0,
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

www.karlstorz.com

