

# Highlights

HYG 1 1.0 09/2018-ES



## Rack de limpieza 39220 CA

El acondicionamiento validado más fácil todavía

**STORZ**  
KARL STORZ – ENDOSKOPE



## Rack de limpieza 39220 CA

### Acondicionamiento validado simplificado

El nuevo rack de limpieza 39220 CA se ha concebido para todos los procesos necesarios en el acondicionamiento mecánico validado y el almacenamiento seguro de hasta doce instrumentos SILCUT®, pinzas de KLEINSASSER y todos los instrumentos con una longitud máxima de 22 cm y dotados con una conexión LUER acodada.

Los dos extremos del bloque de irrigación se conectan al dispositivo de limpieza y desinfección para garantizar el enjuague uniforme de los instrumentos. La conexión de las ranuras que quedan desocupadas se bloquea con un tapón LUER para evitar la pérdida de presión cuando se efectúa el acondicionamiento.

El rack de limpieza se puede asegurar con nuestros pasadores de fijación en cualquier bandeja universal de limpieza de la empresa KARL STORZ, garantizando así el almacenamiento seguro del instrumental.

El rack de limpieza se puede utilizar con los siguientes accesorios:

- 39100 PS **Clavo de fijación**, con tornillo y arandela, altura 38 mm, envase de 12 unidades
- 39502 Z **Bandeja quirúrgica perforada**, para limpieza esterilización y almacenamiento de instrumentos, apilable, asas retráctiles, dimensiones exteriores (ancho x fondo x alto): 480 x 250 x 66 mm

Características especiales:

- Capacidad para un máximo de doce instrumentos
- Conexión con un cierre LUER-Lock estándar
- Compatible con todas las bandejas universales de limpieza, esterilización y almacenamiento de la empresa KARL STORZ
- Enjuague uniforme de los instrumentos gracias a la conexión de los dos extremos del del bloque de irrigación al dispositivo de limpieza y desinfección
- Fijación adicional de los instrumentos mediante tiras de silicona
- Bloque de irrigación y soporte del instrumental adaptable al acodamiento de los instrumentos



Para ajustar la inclinación del bloque de irrigación, se aflojan los tornillos de ambos extremos con una llave Allen y se vuelven a atornillar en la posición deseada. De esta manera se garantiza que tanto los instrumentos SILCUT® como las pinzas de KLEINSASSER quedan colocados correctamente en el dispositivo de irrigación.

- 39220 CA **Rack de limpieza**, para 12 instrumentos, para utilizar con instrumentos SILCUT® e instrumentos de KLEINSASSER con conexión LUER

### Lanzamiento en el mercado:

El rack de limpieza 39220 CA ya está disponible en el mercado.

**Antes de realizar una intervención quirúrgica, se recomienda verificar si ha elegido el producto idóneo.**



**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD



KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Alemania  
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Alemania  
Teléfono: +49 (0)7461 708-0  
Fax: +49 (0)7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)  
[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)