

Highlights


HYG 1 1.0 09/2018-FR



Panier de nettoyage 39220 CA

Procédure de nettoyage homologuée

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

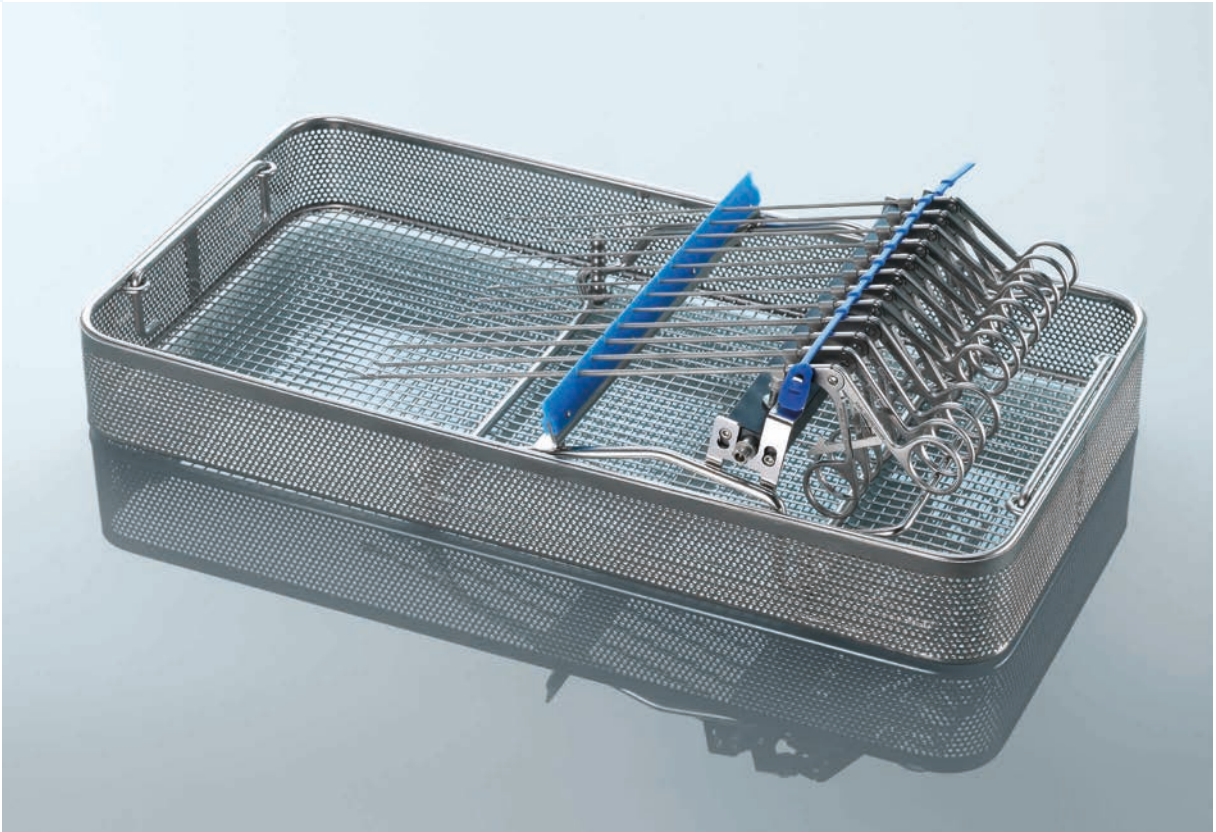

Panier de nettoyage 39220 CA

Procédure de nettoyage homologuée

Le panier de nettoyage 39220 CA est destiné aux procédures homologuées de nettoyage en machine, sur l'ensemble du cycle de traitement, et au stockage de maximum 12 instruments tels que les instruments SILCUT®, les pinces d'après KLEINSASSER et tous les instruments d'une longueur utile de 22 cm maximum et munis d'un raccord coudé LUER.

Les deux extrémités du dispositif d'irrigation du panier se raccordent à un appareil de nettoyage et de désinfection afin d'assurer le rinçage homogène des instruments. Un bouchon LUER est placé sur le raccord d'irrigation de chaque emplacement inoccupé afin d'éviter une perte de pression lors du nettoyage.

Les tiges de fixation permettent d'ancrer le panier de nettoyage dans tous les paniers universels de rangement KARL STORZ.

Le panier de nettoyage est utilisable avec les accessoires suivants :

- 39100 PS **Tige de fixation**, avec vis et rondelle, hauteur 38 mm, paquet de 12
- 39502 Z **Panier** de nettoyage, stérilisation et stockage pour instruments, empilable, dimensions extérieures (l x p x h) : 480 x 250 x 66 mm

Caractéristiques :

- Pour maximum 12 instruments
- Raccordement des instruments via LUER-Lock standard
- Utilisable avec tous les paniers universels de rangement KARL STORZ
- Rinçage homogène des instruments obtenu par raccordement des deux extrémités du dispositif d'irrigation à un appareil de nettoyage et de désinfection
- Fixation supplémentaire des instruments par une bande en silicone
- Avec surface de dépôt pour instruments et forme du dispositif d'irrigation adaptée aux instruments coudés



Inclinable, le dispositif d'irrigation s'oriente dans la position souhaitée en réglant les vis situées des deux côtés au moyen d'une clé Allen. De cette façon, les instruments SILCUT® et les pinces d'après KLEINSASSER reposent correctement sur le dispositif d'irrigation.

39220 CA **Panier de nettoyage** pour 12 instruments, à utiliser avec les instruments SILCUT® et d'après KLEINSASSER munis d'un raccord LUER

Lancement sur le marché :

Le panier de nettoyage 39220 CA est disponible en stock dès à présent.

Il faut veiller à utiliser les produits uniquement pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus.

Dénomination : Panier de nettoyage et accessoires associés – Destinataires :
Professionnels de santé exerçant sur le territoire français – Caractéristiques :
Utilisation procédures de nettoyage mécaniques homologuées – Classe : I, IIa, IIb –
Marquage CE : 0123 – Fabricant : KARL STORZ SE & Co. KG – Informations
bon usage et recommandations avant utilisation : il est indispensable de lire
attentivement la notice d'instructions et l'étiquette du produit – Date d'élaboration
ou de modification document : 09/2018 –
Copyright © Reproduction interdite sans autorisation