


## Endoskop-Vorwärmekissen zum Einmalgebrauch

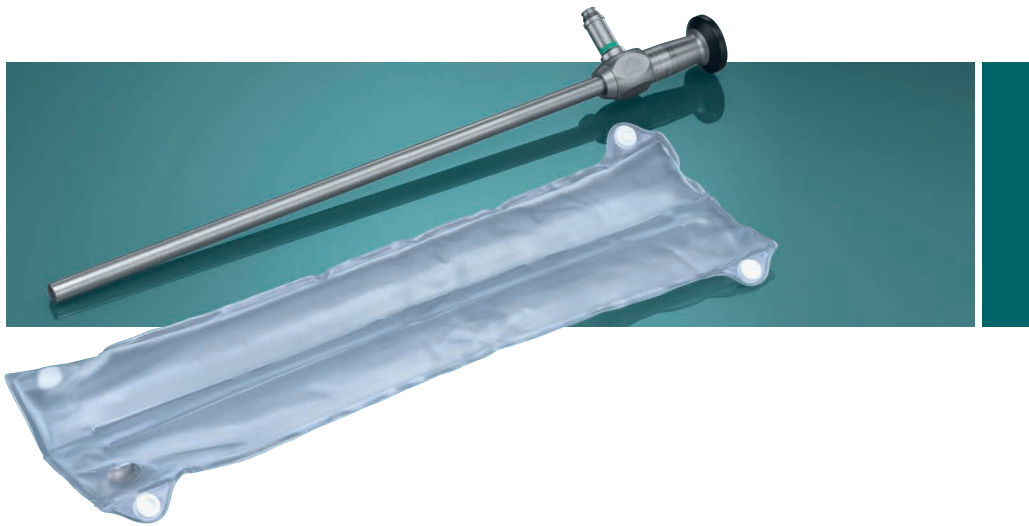


## Endoskop-Vorwärmekissen zum Einmalgebrauch

### Zur Erwärmung des Endoskops für ein beschlagfreies Arbeiten



Das Beschlagen des Endoskops stellt eine ernst zu nehmende Herausforderung im klinischen Alltag dar. Die durchschnittliche Raumtemperatur im OP beträgt 20 °C, während die Körpertemperatur des Patienten bei ca. 37 °C liegt. Diese Differenz zwischen Raum- und Körpertemperatur hat häufig zur Folge, dass das Endoskop bei der Einführung in das Körperinnere beschlägt und die Sicht des Operators beeinträchtigt wird. Dieser Effekt wird durch das Vorwärmen des Endoskops vermindert. KARL STORZ bietet zu diesem Zweck die Endoskop-Vorwärmekissen zum Einmalgebrauch an.

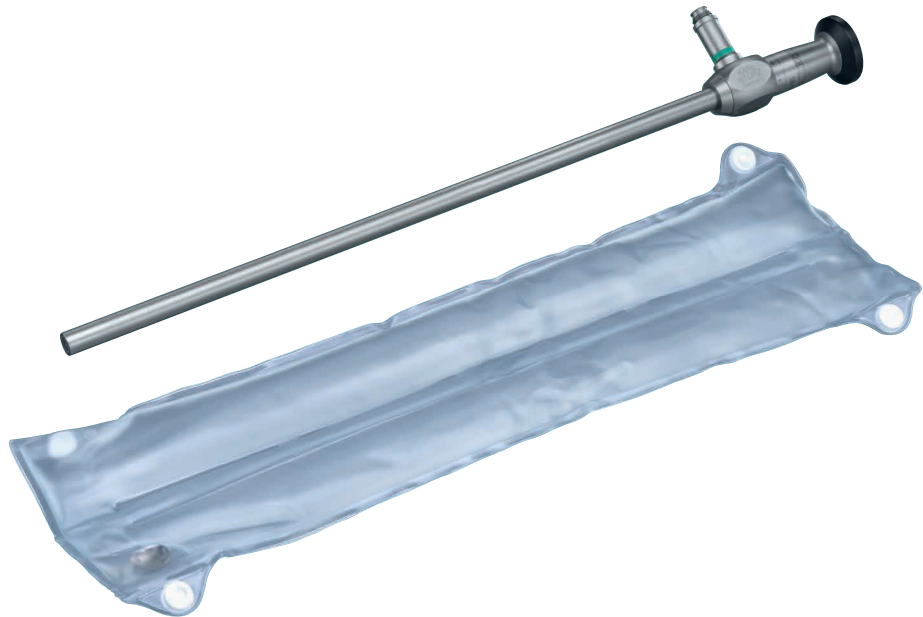

## Produkteigenschaften

- Aktivierung des Vorwärmekissens zur Erwärmung des Endoskops über ein Metallplättchen
- Für alle starren Endoskope geeignet
- In zwei verschiedenen Größen erhältlich (12 x 20 cm und 12 x 36 cm)
- Es wird keine andere Wärmequelle (Elektrizität, warmes Wasser, etc.) benötigt
- Produkt wird steril geliefert und ist sofort einsatzbereit
- Paralleles Vorwärmen von zwei Endoskopen in einem Wärmekissen möglich

## Anwendung des Endoskop-Vorwärmekissens


1. Endoskop einlegen und Vorwärmekissen mithilfe der angebrachten Druckknöpfe schließen.



2. Das silberne Metallplättchen zur Aktivierung des Vorwärmekissens umbiegen.  
Für ein optimales Wärmeergebnis wird empfohlen, das Wärmekissen ca. 5 Minuten vor Einsatz des Endoskops zu aktivieren.



## Verfügbare Größen

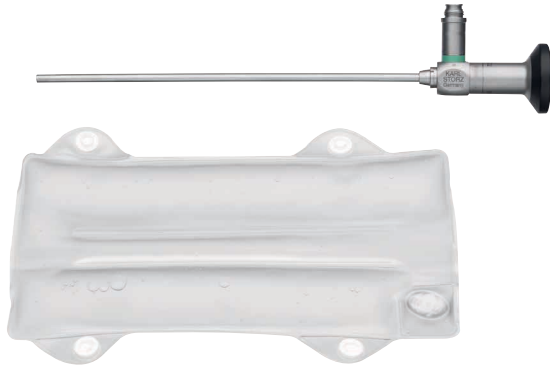


- 100120-15 **Endoskop-Vorwärmekissen**, 12 x 20 cm, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 15 Stück, zur Verwendung mit allen gängigen starren Endoskopen, deren optisches System aufgrund der Länge in das Kissen passt



- 100121-10 **Endoskop-Vorwärmekissen**, 12 x 36 cm, steril, zum Einmalgebrauch, Packung zu 10 Stück, zur Verwendung mit allen gängigen starren Endoskopen, deren optisches System aufgrund der Länge in das Kissen passt

# Notizen

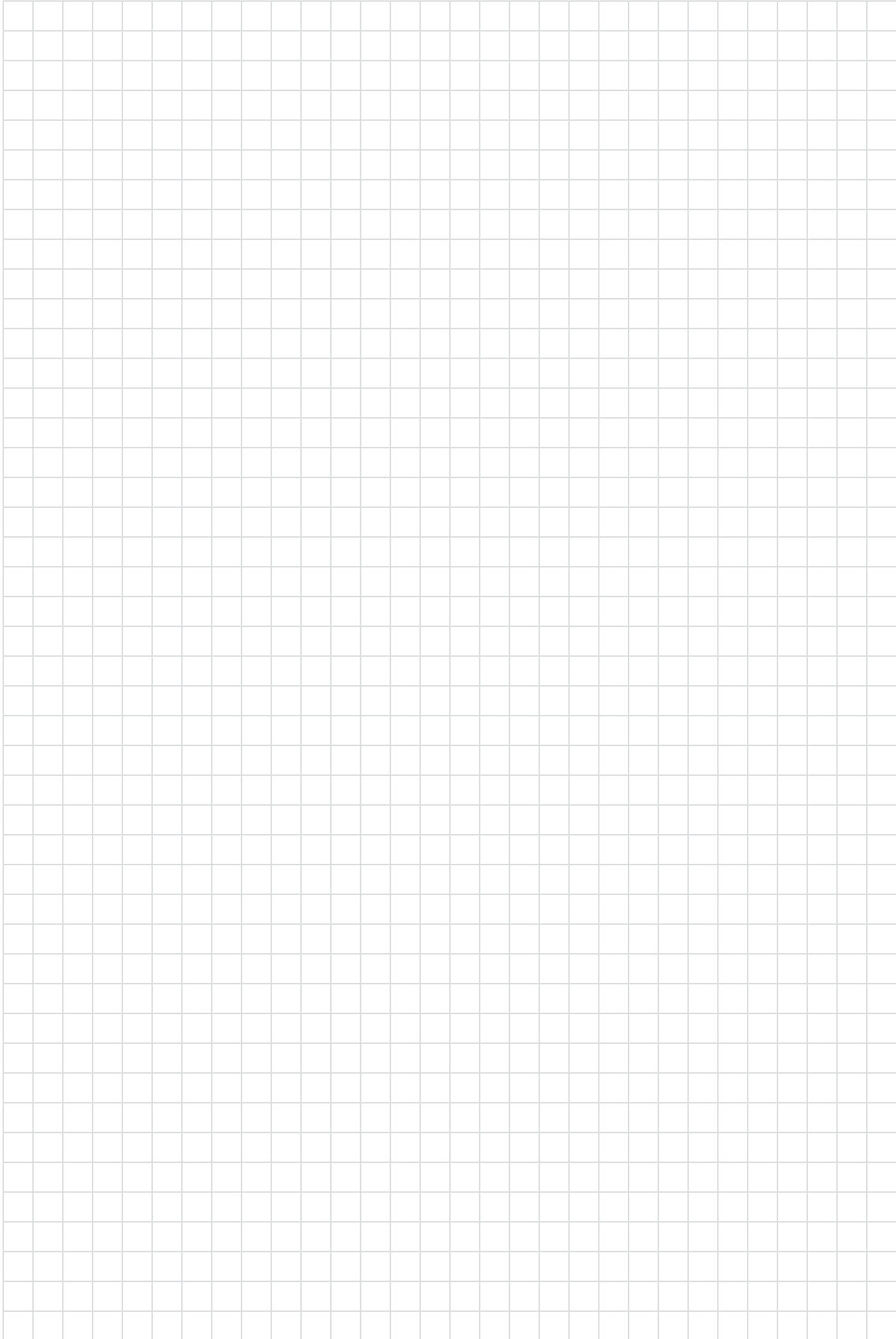



More than  
**75**  
Years

*Shaping the Future  
of Endoscopy with you*

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG  
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany  
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany  
Telefon: +49 7461 708-0  
Telefax: +49 7461 708-105  
E-Mail: [info@karlstorz.com](mailto:info@karlstorz.com)

[www.karlstorz.com](http://www.karlstorz.com)

