


Coussin de préchauffage pour endoscope A usage unique

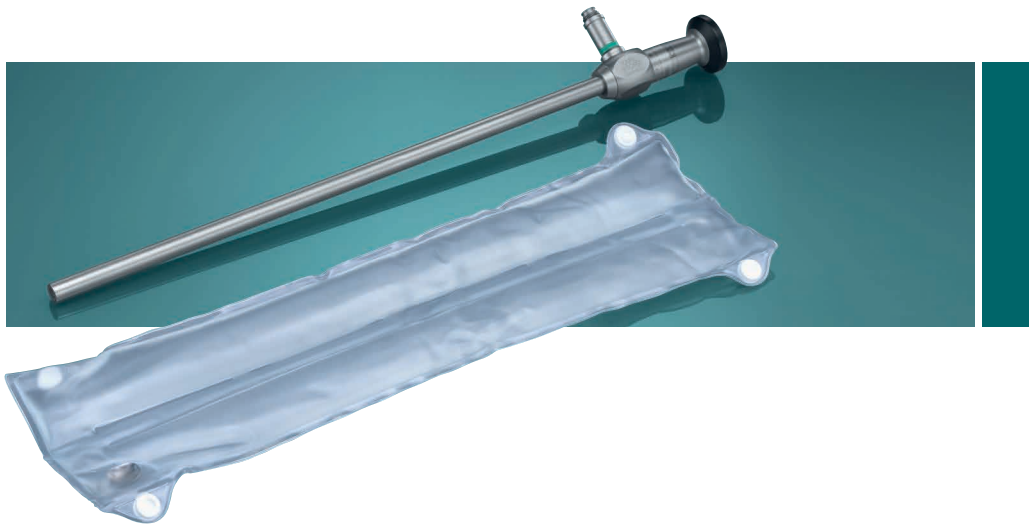


Coussin de préchauffage à usage unique pour endoscope

Pour prévenir la formation de buée



La formation de buée sur la lentille de l'endoscope est un phénomène qui complique le quotidien opératoire. La température ambiante moyenne en salle d'opération est de 20 °C tandis que la température du patient est d'environ 37 °C. Cette différence de température provoque souvent la formation de buée sur l'endoscope lors de son introduction à l'intérieur du corps du patient et a pour conséquence d'affecter la visibilité de l'opérateur. Le coussin de préchauffage à usage unique KARL STORZ pour endoscopes permet de réduire le phénomène de condensation.

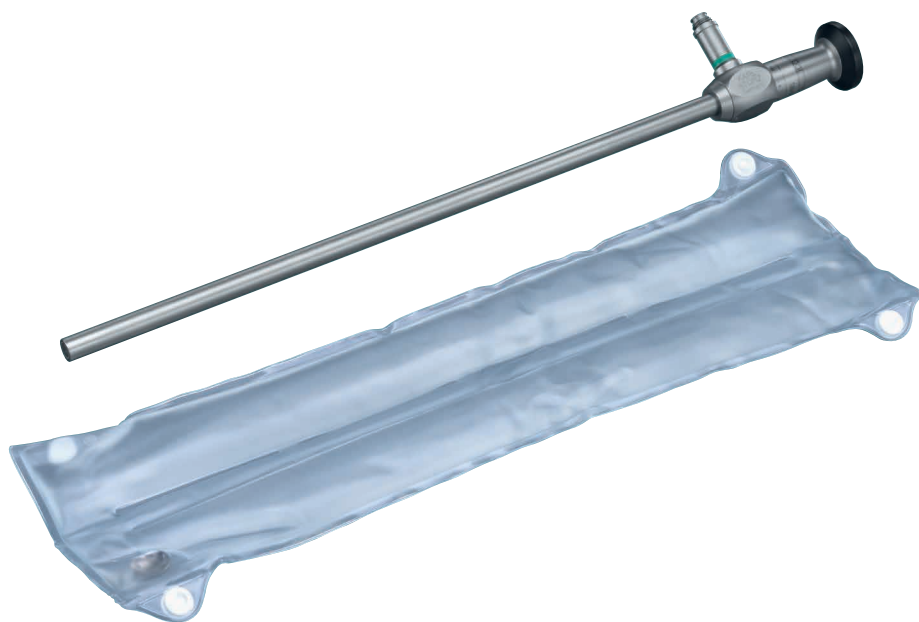

Caractéristiques

- Activation du préchauffage au moyen d'une plaquette métallique
- Utilisable avec tous les endoscopes rigides
- Existe en deux tailles (12 x 20 cm et 12 x 36 cm)
- Recours inutile à une source de chaleur supplémentaire (que ce soit électricité ou eau chaude, etc.)
- Produit livré sous emballage stérile, immédiatement prêt à l'emploi
- Préchauffage de deux endoscopes à la fois

Utilisation du coussin de préchauffage


1. Glisser l'endoscope à l'intérieur du coussin de préchauffage et fermer le coussin au moyen des boutons pression.



2. Rabattre la plaquette argentée afin d'activer le préchauffage du coussin.
Il est recommandé de mettre en œuvre le préchauffage environ 5 minutes avant d'utiliser l'endoscope.



Tailles existantes

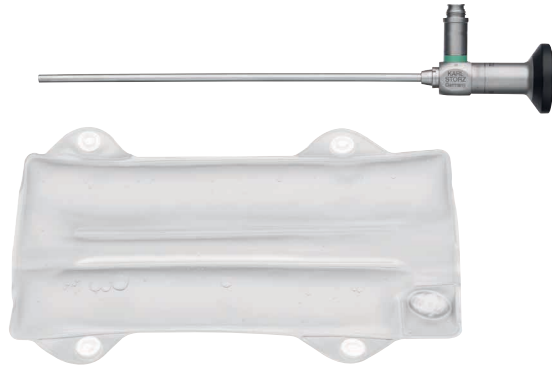


- 100120-15 **Coussin de préchauffage pour endoscope, 12 x 20 cm, stérile, à usage unique, paquet de 15, à utiliser avec tous les endoscopes rigides courants, dont la longueur du système optique correspond aux dimensions du coussin**



- 100121-10 **Coussin de préchauffage pour endoscope, 12 x 36 cm, stérile, à usage unique, paquet de 10, à utiliser avec tous les endoscopes rigides courants, dont la longueur du système optique correspond aux dimensions du coussin**

Notes

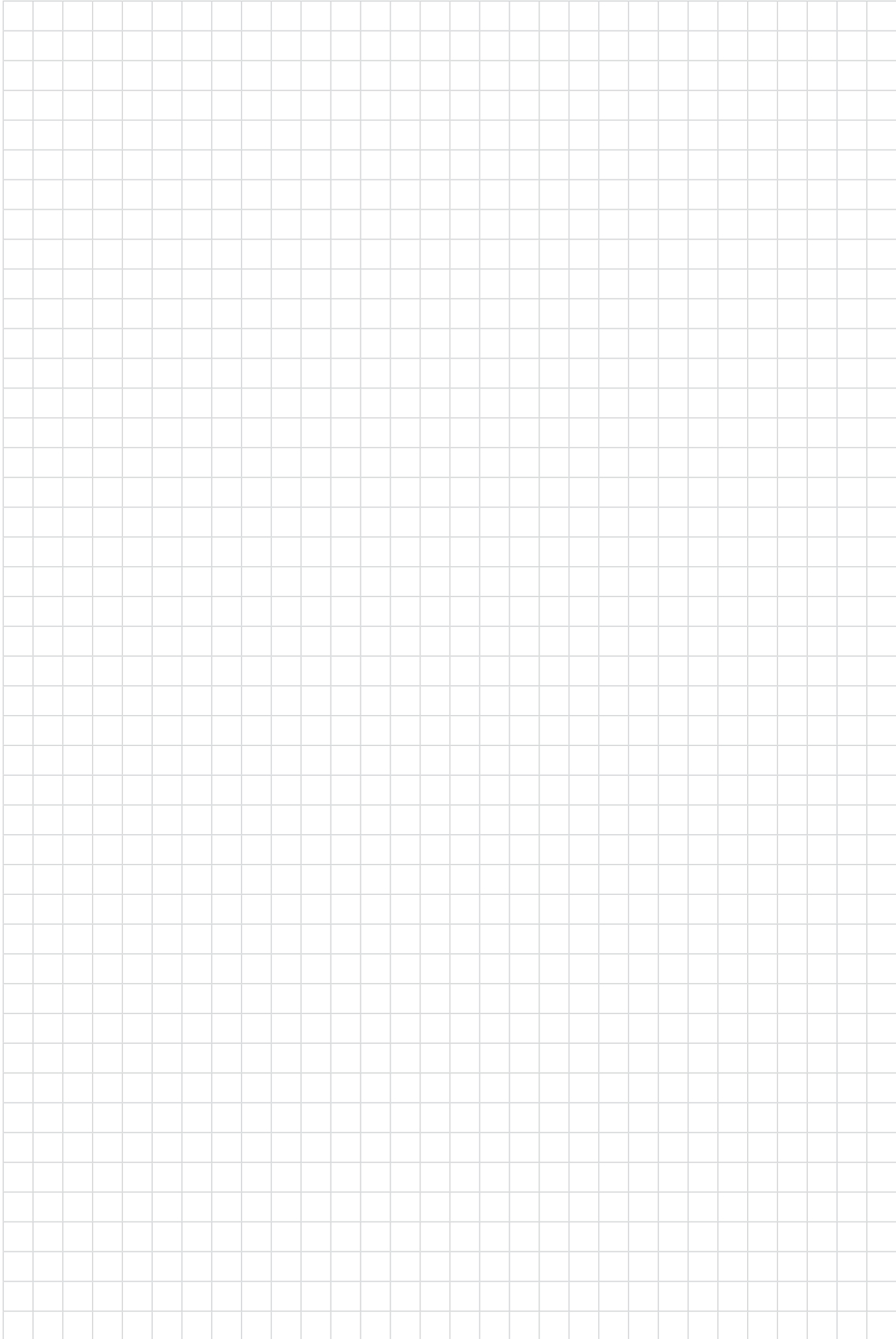

Notes



Coussin de préchauffage : destiné à préchauffer des endoscopes avant utilisation pour élimination de buée.
Il s'agit de dispositifs médicaux de classe IIa, CE 2460.
Produit fabriqué par TEN COMFORT CORPORATION, Taïwan.
Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

Il est recommandé de vérifier au préalable que les produits sont uniquement utilisés pour les fins médicales en vue desquelles ils ont été conçus. Il est important de noter que le délai de mise en vente sur les marchés locaux des produits contenus dans cette brochure est soumis aux critères d'homologation propres à chaque pays.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Allemagne
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Allemagne
Téléphone : +49 7461 708-0
Téléfax : +49 7461 708-105
E-Mail : info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

